

# АКВА МАРИС



## ИНСТРУКЦИЯ-ВКЛАДЫШ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

### КАПЛИ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ ПОЛОСТИ НОСА АКВА МАРИС ДЛЯ ДЕТЕЙ

Регистрационное удостоверение:  
№ РЗН 2018/7964 от 21.12.2018 г.

**Стерильный изотонический  
раствор морской воды.**

**Содержание NaCl не менее 9 г/л.**

#### СОСТАВ НА 100 МЛ:

30 мл воды Адриатического моря с натуральными микроэлементами; 70 мл воды очищенной.

Натуральная вода Адриатического моря, входящая в состав раствора, содержит ионы  $Cl^-$ ,  $Na^+$ ,  $SO_4^{2-}$ ,  $Mg^{2+}$ ,  $Ca^{2+}$ ,  $K^+$ ,  $HCO_3^-$ ,  $Br^-$ , а также микроэлементы, такие как: цинк, селен, йод, железо, марганец и др.

Не содержит консервантов и химических добавок.

#### ВНЕШНИЙ ВИД:

Бесцветный прозрачный раствор без запаха.

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Капли для орошения полости носа Аква Марис для детей предназначены для нанесения на слизистую оболочку носа для увлажнения слизистой оболочки и удаления выделений.

#### ПРИМЕНЯЕТСЯ:

- для орошения и увлажнения;
- для удаления вирусов, бактерий и инородных частиц;
- для уменьшения раздражения и воспаления локальных участков слизистой оболочки носа;
- для восстановления слизистой оболочки носа.

#### ОПИСАНИЕ:

Стерильная изотоническая морская вода увлажняет слизистую оболочку носа и способствует поддержанию ее нормального физиологического состояния, способствует разжижению слизи и нормализации ее выработки в бокаловидных клетках слизистой

оболочки носовой полости.

Микроэлементы воды Адриатического моря улучшают функцию мерцательного эпителия, оказывают стимулирующее, восстановительное, очищающее, противовоспалительное действие на слизистую оболочку полости носа, повышают ее устойчивость к внедрению патогенных микроорганизмов.

**Ионы кальция и магния** стимулируют движение «реснитчатых клеток» слизистой оболочки, способствующих удалению из полости носа микроорганизмов и инородных частиц, и нормализуют реологические свойства слизи.

**Йод, ионы натрия и хлорид-ионы** оказывают антисептический эффект, а также активизируют выработку защитной слизи.

**Ионы цинка и селена** стимулируют местный иммунитет слизистой оболочки носа и околоносовых пазух.

**Ионы кальция** обладают противоаллергическим действием.

**Карбонаты, сульфаты, хлориды** нормализуют выработку назальной слизи.

Капли для орошения полости носа Аква Марис для детей способствуют смыванию и удалению вирусов, бактерий, аллергенов и инородных частиц со слизистой оболочки носа, уменьшению местного воспалительного процесса.

Капли для орошения полости носа Аква Марис для детей, применяемые с гигиеническими целями, способствуют очищению слизистой от осевшей на ней уличной и комнатной пыли.

#### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- ежедневный уход за полостью носа (увлажнение, удаление «корочек»);
- профилактика острых респираторных инфекций (ОРВИ);
- профилактика ринита;
- сухость слизистой оболочки полости носа;

- подготовка слизистой оболочки к применению назальных препаратов.

капельнице вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для профилактики ОРВИ и ринита и ежедневной гигиены носовой полости: детям с первых дней жизни по 1 – 2 капли в каждый носовой ход несколько раз в день, при необходимости возможно более частое применение.

Для устранения сухости и раздражения в носовой полости: детям с первых дней жизни по 3-4 капли в каждый носовой ход несколько раз в день, при необходимости возможно более частое применение.

#### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Капли для орошения полости носа Аква Марис для детей совместимы со всеми средствами, используемыми для лечения насморка.

Продолжительность применения не ограничена.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Не выявлены.

#### СПОСОБНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ АВТОТРАНСПОРТОМ ИЛИ РАБОТЕ С ДРУГИМИ МЕХАНИЗМАМИ:

Не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом и работе с другими механизмами.

#### ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ:

Может применяться при беременности и лактации.

#### ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Не выявлены.

#### СРОК ГОДНОСТИ:

2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Использовать в течение 45 дней после вскрытия флакона.

#### ФОРМА ВЫПУСКА И УПАКОВКА:

По 10 мл раствора в полиэтиленовом флаконе-капельнице с защитной крышечкой. По одному флакону-

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ (ЭКСПЛУАТАЦИИ):

Хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 25°C, влажности 45-80%, давлении 84-106.7 кПа.

#### УТИЛИЗАЦИЯ:

Капли для орошения полости носа Аква Марис для детей не оказывают негативного воздействия на окружающую среду, поэтому специальные меры для утилизации раствора не требуются.

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia (ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о., Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия).

#### Место производства:

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia (ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о., Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия).

#### ПРЕТЕНЗИИ К КАЧЕСТВУ ПРОДУКТА СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ В АДРЕС ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯДРАН»:


119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.38, офис VII, тел./факс: +7(499)143-33-71.

[www.aquamaris.ru](http://www.aquamaris.ru)



*Внимание! В данном документе представлены только основные сведения, все дополнительные параметры содержатся в Инструкции*

*по применению для специалистов с медицинским образованием и также могут быть предоставлены по запросу.*

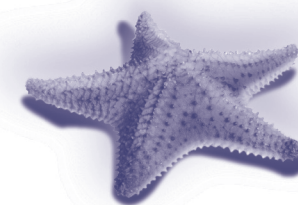

130002718/01