

# АКВА МАРИС®



## ИНСТРУКЦИЯ по применению

### Насадки сменные для аспиратора назального для детей «Аква Марис®»

#### РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ:

#### КОМПОНЕНТЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

- **Сменная одноразовая насадка** с наконечником анатомической формы, который вставляется в носовой ход ребенка;
- **Абсорбирующий фильтр** для удерживания слизистых выделений из носа.

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Насадки сменные для аспиратора назального для детей «Аква Марис®» предназначены для удаления слизистых выделений из носа у детей.

#### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Насадки сменные, соответствующие анатомическим особенностям строения носика ребенка, используются с Аспиратором назальным для детей «Аква Марис®», предназначены для удаления слизистых выделений из носа у детей. Применение аспиратора показано при гриппе, простуде, синусите и других инфекциях, которые

вызывают насморк. Таким образом, назальный аспиратор позволяет обеспечить ребенку свободное дыхание.

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Сменные насадки используются с Аспиратором назальным для детей «Аква Марис®» каждый раз, когда у ребенка наблюдаются излишние слизистые выделения из носа. Перед использованием назального аспиратора рекомендуется промыть нос раствором морской воды.



1 Положить ребенка на спину на безопасную и удобную поверхность.



2 Присоединить сменную насадку к центральной части корпуса аспиратора (см. схему изделия).



3 Взять мундштук в рот, вставить наконечник в один из носовых ходов ребенка и осторожно втягивать ртом воздух через мундштук. Абсорбирующий фильтр насадки будет удерживать выделения, препятствуя их попаданию в аспирационную трубку, таким образом, любое проглатывание выделений исключено.



4 Повторить процедуру для другого носового хода.

Отсоединить использованную насадку и выбросить ее.

#### СХЕМА ИЗДЕЛИЯ:

##### УСТРОЙСТВО НАЗАЛЬНОГО АСПИРАТОРА



#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Известные противопоказания отсутствуют.

#### ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

При применении в соответствии с инструкцией побочные действия не выявлены.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте.

#### СРОК ГОДНОСТИ:

5 лет. Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить изделие в неповрежденных упаковочных коробках, с защитой от прямого солнечного света, при нормальной температуре и влажности.

#### УПАКОВКА:

10 сменных насадок запечатаны в блистерную упаковку, которая помещена в картонную коробку.

#### ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ:

По истечении срока годности изделия утилизируются в соответствии с действующим законодательством РФ. Неиспользованные и использованные изделия утилизируются как бытовые отходы.

#### ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ:

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia.  
ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЈ а.о., Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия.

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Pharmalink, S.L., Avda. Universitat Autònoma, 13, Parc Tecnològic del Valles, 08290 Cerdanyola del Valles, Barcelona, Spain.  
Фармалинк, С.Л., Проспект Университат Аутонома, 13, Технологический Парк дель Вальес, 08290 Серданьола-дель-Вальес, Барселона, Испания.

#### Адрес места производства:

Pharmalink, S.L., Ctra. De Valls, TV-2034, KM 6, Vilavella, 43886 Tarragona, Spain.

Фармалинк, С.Л., Шоссе де Вальес, TV-2034, KM 6, Вилавелья, 43886 Таррагона, Испания.

**Претензии к качеству следует направлять в адрес Общества с ограниченной ответственностью «ЯДРАН» (ООО «ЯДРАН»): 119330, Москва, Ломоносовский проспект, д.38, оф. 30.  
Тел.: +7 (495) 970-18-82.**