

Аква Марис Устройство

Инструкция по применению

Устройство оториноларингологическое для промывания слизистой носа индивидуальное "АКВА МАРИС" в наборе со средствами для промывания
Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2010/07753
от 30.08.2010 г.



Средство для промывания к устройству оториноларингологическому для промывания слизистой носа индивидуальному "АКВА МАРИС"
№ ФСЗ 2010/07752
от 30.08.2010 г



Описание

Устройство оториноларингологическое для промывания слизистой носа индивидуальное АКВА МАРИС в наборе со средствами для промывания, варианты исполнения:

1. емкость 330 мл и 30 пакетов-саше с морской солью;
2. емкость 330 мл и 30 пакетов-саше с морской солью, обогащенной гипоаллергенными эфирными маслами Мирта обыкновенного и Бессмертника итальянского.

Устройство рекомендовано для индивидуального использования и применяется в целях профилактики гриппа, ОРВИ, лечения ринитов и синуситов, гигиены носа (лицам, работающим на вредном производстве, спортсменам) путем промывания полости носа и носоглотки специальным раствором.

Устройство оториноларингологическое АКВА МАРИС позволяет удобно и безопасно промывать нос по всей длине носовых ходов. Жидкость для промывания подается в полость носа самотеком, т.е. без дополнительного давления, что позволяет избегать такого осложнения как воспаление среднего уха (отит). Процедура проста и безопасна даже для детей, беременных и кормящих женщин.

При промывании полости носа с помощью устройства АКВА МАРИС с поверхности слизистой носа удаляется патологический секрет вместе с вирусами, бактериями, аллергенами и пылью, уменьшается отек и воспаление, повышается тонус капилляров. На слизистую оказывают благотворное воздействие микроэлементы и соли Адриатического моря.

Действие микроэлементов и солей Адриатического моря:

- ионы кальция и магния значительно улучшают работу клеток мерцательного эпителия слизистой оболочки носа, нормализуют реологические свойства слизи, усиливают резистентность слизистой оболочки полости носа к внедрению вирусов и бактерий;
- йод и хлорид натрия оказывают антисептический эффект, а также активизируют выработку защитной слизи бокаловидными клетками,
- ионы цинка и селена стимулируют местный иммунитет слизистой носа и околоносовых пазух.

Показания:

Устройство для промывания носа АКВА МАРИС обеспечивает качественную и мягкую санацию носовых ходов и рекомендуется к применению:

- пациентам с острым ринитом при ОРВИ,
- пациентам с аллергическим ринитом,
- пациентам с гайморитом, фронтитом, этмоидитом,
- пациентам с аденоидитом,
- пациентам с повышенной сухостью слизистой оболочки носа и образованием корок,
- часто болеющим пациентам,
- после хирургического вмешательства на полости носа (по рекомендации врача),
- как составная часть ежедневной гигиены,
- спортсменам и людям, предпочитающим активный отдых, перед началом физической активности.

Промывание полости носа:

1. Разрежьте пакетик и высыпьте морскую соль в устройство.
2. Заполните устройство кипяченой водой температуры тела до метки и перемешивайте до полного растворения соли.
3. Займите удобное положение перед раковиной. Голову наклоните вперед и слегка поверните в сторону.



4. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. Приложите кончик устройства к вышерасположенной ноздре таким образом, чтобы он был плотно прижат к ней.



5. Наклоните устройство таким образом, чтобы раствор начал поступать из кончика устройства в носовой ход. Раствор будет вытекать из противоположной ноздри.



6. Для удаления остатков раствора из носа высморкайтесь, не меняя положения головы.



7. Затем высморкайтесь в прямом положении.



8. Повторите процедуру с другой ноздрей.
После использования промойте устройство прохладной водой и хорошо его высушите. Раствор морской соли, обогащенной гипоаллергенными эфирными маслами, рекомендуется использовать ежедневно.

Противопоказания:

Острый отит и обострение хронического отита, индивидуальная непереносимость компонентов средства для промывания, аллергические реакции на компоненты средства для промывания, частые носовые кровотечения, доброкачественные и злокачественные новообразования в полости носа, полная непроходимость носовых ходов, детский возраст до 5 лет.

Особые указания:

Возможно применение при беременности и в период лактации.

Срок годности:

2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°C в сухом, недоступном для детей месте.

Производитель

АО «Ядран» Галенский Лабораторий; 51000, Пулац б/н, Риека, Хорватия.

Представительство АО «Ядран» Галенский Лабораторий в Москве

Россия, 119330, г.Москва, Ломоносовский пр-т, д.38, оф.3.