

АКВА МАРИС®



Инструкция-вкладыш по применению для пациентов

Насадки сменные для аспиратора назального для детей «АКВА МАРИС®»

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ:

№ РЗН 2017/5897 от 09.08.2024 г.

КОМПОНЕНТЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

- **Сменная одноразовая насадка** с наконечником анатомической формы, который вставляется в носовой ход ребенка;
- **Абсорбирующий фильтр** для удерживания выделений из носа.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Насадки сменные для аспиратора назального для детей «АКВА МАРИС®» предназначены для совместного использования с «Аспиратором назальным для детей «АКВА МАРИС®» с целью удаления слизистых выделений из носа у детей при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Насадки сменные для Аспиратора назального для детей «АКВА МАРИС®», соответствующие анатомическим особенностям строения носика ребенка, используются с «Аспиратором назальным для детей «АКВА МАРИС®», предназначены для удаления слизистых выделений из носа у детей. Применение аспиратора показано при гриппе, простуде, синусите и других инфекциях, которые вызывают насморк, а также для регулярного ухода за полостью носа. Таким образом, назальный аспиратор позволяет обеспечить младенцу свободное дыхание.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Сменные насадки используются с Аспиратором назальным для детей «АКВА МАРИС®» каждый раз, когда у ребенка наблюдаются излишние слизистые выделения из носа. Перед использованием назального аспиратора рекомендуется промыть нос раствором морской воды.



1 Положить ребенка на спину на безопасную и удобную поверхность.



2 Присоединить сменную насадку к центральной части корпуса аспиратора (см. схему изделия).



3 Взять мундштук в рот, вставить наконечник в один из носовых ходов ребенка и осторожно втягивать ртом воздух через мундштук. Абсорбирующий фильтр насадки будет удерживать выделения, препятствуя их попаданию в аспирационную трубку, таким образом, любое проглатывание выделений исключено.



Повторить процедуру для другого носового хода.

4 Отсоединить использованную насадку и выбросить ее.

УСТРОЙСТВО НАЗАЛЬНОГО АСПИРАТОРА:



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Известные противопоказания отсутствуют.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

При применении в соответствии с инструкцией побочные действия не выявлены.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ:

5 лет. Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Транспортировать и хранить изделие в неповрежденных упаковочных коробках, с защитой от прямого солнечного света, при температуре от 0°C до 25°C, относительной влажности воздуха 35-85%, атмосферном давлении 70-160 кПа.

УПАКОВКА:

10 сменных насадок запечатаны в блистерную упаковку, которая помещена в картонную коробку.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ:

После окончания срока эксплуатации изделия утилизируются в соответствии с действующим законодательством РФ (СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»):

Использованные насадки могут быть биологически опасными. Их утилизацию осуществляется по классу Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Утилизацию неиспользованных насадок следует осуществлять по классу А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 (аналогично бытовым отходам).

ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ:

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia, Tel./Fax: +385 51 546 124
(ЯДРАН - ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЈ а.о., Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия, Тел./Факс: +385 51 546 124).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

PHARMALINK, SL/ФАРМАЛИНК, СЛ
Avda. Universidad Autonoma, 13 Parc Tecnologic del Valles – 08290 Cerdanyola del Valles (Barcelona), Spain/Проспект Университат Аутонома, 13 Технологический Парк дель Вальес – 08290 Серданьола дель Вальес (Барселона), Испания.

Адрес места производства:

PHARMALINK, SL/ФАРМАЛИНК, СЛ
CTRA. DE VALLS TV-2034, KM 6 - 43886 VILABELLA (TARRAGONA) SPAIN /КТРА. ДЕ ВАЛЬС ТВ-2034, КМ 6 - 43886 ВИЛАБЕЛЬЯ (ТАРРАГОНА) ИСПАНИЯ.

Претензии к качеству следует направлять в адрес Общества с ограниченной ответственностью «ЯДРАН» (ООО «ЯДРАН»): 107564, г. Москва, Краснобогатырская улица, дом 6 строение 6, комн.26, 1 этаж.

Внимание! В данном документе представлены только ОСНОВНЫЕ сведения, все дополнительные параметры содержатся в Инструкции по применению для специалистов с медицинским образованием и также могут быть предоставлены по запросу.